

Dribblestop™

Harninkontinenzklemme für Männer Medizinprodukt Klasse-1

GEBRAUCHSANLEITUNG

(Bitte lesen Sie für die besten Resultate die ganze Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.)

WICHTIG

Jede Verpackungseinheit enthält zwei Klemmen und zusätzliche Abstandshalter. Es ist wichtig, die Klemmen täglich zu wechseln, damit der Memory - Schaumstoff für optimale Leistung seine Form und Größe wiedererlangt.

Die Klemme besteht aus zwei Kunststoffteilen und Abstandshaltern zur Größenanpassung. Sowohl die Ober- als auch die Unterseite sind mit einer medizinisch zugelassenen Schaumstoffpolsterung versehen, die keine Flüssigkeit aufnimmt und leicht sauber zu halten ist. Waschen sie die wiederverwendbare Klemmenteile vorsichtig mit Seife und warmem Wasser. Spülen Sie die Klemmenteile hinterher ab und trocken diese mit einem Tuch.

Der obere Klemmenarm hat eine lange Einrastkerbe und ist rot markiert, damit man den Teil der Klemme zum Festmachen und Öffnen erkennt. Dieser Teil wurde so entworfen, dass die Klemme einfach zu öffnen und zu schließen ist und nicht zusammenschnappt. **Die andere Seite ist die Seite mit dem sicheren, fixierten Ende, das einschnappt.**

Der untere Arm ist mit Schaumstoff beschichtet und übt Druck auf die Unterseite des Penis aus, um die Harnröhre zu schließen und den Harnfluss zu stoppen. Das Blut im Penis kann ungehindert fließen, da die Klemme keinen Druck auf die Seiten ausübt.

Wenn Ihnen der natürliche Drang fehlt, die Blase zu entleeren, ist es ratsam, die Klemme alle zwei bis drei Stunden zu lösen und den Urin ablaufen zu lassen, um somit eine Überfüllung der Blase zu vermeiden. Um sich vor versehentlichen Leckagen zu schützen, die auftreten können, wenn die Klemme falsch positioniert ist oder bei starken körperlichen Aktivitäten, wird empfohlen zusätzlich eine aufsaugende Einlage zu verwenden.

EINE KLEMMENGRÖSSE WÄHLEN

Beide Klemmen sind für eine mittelgroße Passgröße voreingestellt. Verwenden Sie die Anweisungen und Diagramme rechts, um die Klemme auf eine kleinere oder größere Größe zu stellen. **Halten Sie den Link in vertikaler Position und drücken Sie ihn nach unten in die Kerbe oder schieben Sie ihn von der Seite hinein, um ihn einfacher in die Kerbe auf der fixen Seite einzufügen.** Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen für eine korrekte Positionierung und Pflege Ihrer Klemmen. Denken Sie daran, die Klemme soll angenehm sitzen und nur leichten Druck auf den Penis ausüben.


Beschnitten: Platzieren Sie die Klemme direkt hinter dem Kopf des Penis.

Unbeschnitten: Haben Sie zusätzliche, lose Penishaut? Diese lose Haut neigt auf natürliche Weise dazu, sich über die Eichel zu bewegen. Ziehen Sie also die lose Haut über die Eichel, bevor Sie die Klemme positionieren. Dadurch wird verhindert, dass die lose Haut den Penis weiter nach unten bewegt, wodurch die Klammer abrutschen kann. Diese Methode wird auch funktionieren, wenn Sie leichtes Übergewicht haben, da man dadurch verhindert, dass die Klemme durch den Druck vom Ansatz des Penis verrutscht.

POSITIONIERUNG DER KLEMME

1. Positionieren Sie die Klemme 1-1, 5 cm hinter dem Peniskopf. Positionieren Sie den Penis in der **Mitte des unteren Arms der Klemme.**
2. Halten Sie die Klemme fest und legen Sie den oberen Klemmenarm (mit der roten Kerben Markierung) über den Penis. Dieses Ende des Klemmenarms (in den roten Kerben befestigen und lösen) sollte jetzt oben und zentriert über dem Penis sein. Haken Sie den Abstandshalter in die Kerbe des Klemmenarms ein. Die Klemme befindet sich jetzt in der geschlossenen Position.
3. Verwenden Sie keine Links mit mehr als einem Größenunterschied zwischen den beiden Enden der Klemme, um zu verhindern,

Achten Sie darauf, dass sich der Penis zentral in der Klemme befindet.

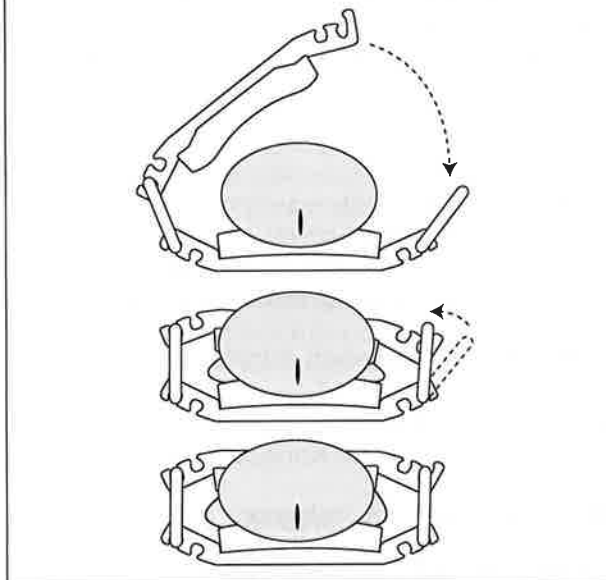

dass der Penis seitlich wegrutscht (was zum Auslaufen von Urin führen kann). Verwenden Sie zum Beispiel einen kleinen Link auf der einen Seite und einen kleinen Link auf der anderen Seite oder klein mit mittelgroß. Vermeiden Sie es aber klein mit groß zu verwenden.


4. Durch die zusätzlichen Links können beiden Klemmen auf die gleiche Größe angepasst werden.
5. Wechseln Sie die Klemme täglich.
6. Halten Sie den Genitalbereich sauber, um Irritationen zu vermeiden.

Wenn die Klemme einen unangenehmen Druck ausübt oder Sie einen leichten Schmerz spüren, dann ist sie zu eng. Stellen Sie sicher, dass sich keine Falten in der Penishaut befinden, da dies auch zu Beschwerden führen kann. Die Klemme sitzt korrekt, wenn sie komfortabel zu tragen ist und kein Urin mehr ausläuft. Wenn Sie spüren, dass Sie auf die Toilette gehen müssen, dann öffnen Sie einfach den Verschluss, aber entfernen Sie nicht die Klemme. Sie können dann die Klemme einfach wieder schließen, wenn Sie fertig sind.

Die folgenden Klemmen-Diagramme zeigen Ihnen die verfügbaren Größenoptionen, wenn Sie nur die äußeren Kerben verwenden. Kleine Größen können nur die inneren Kerben erzielt werden. Kombinieren Sie nur Link-Größen, mit einer Link-Größe Unterschied zwischen den Enden, um größere oder kleinere halbe Größen zu erhalten. Beide Klemmen im Kit sind für eine mittelgroße Passgröße voreingestellt.


KLEIN

Verwenden Sie den kleinen Link am fixen Ende und schließen Sie die Klemme mit dem kleinen Link am anderen Ende.

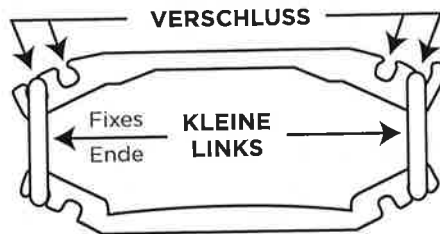


MITTEL

Verwenden Sie den mittleren Link am fixen Ende und schließen Sie die Klemme mit dem mittleren Link am anderen Ende.

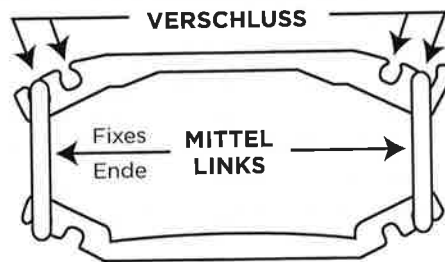

GROSS

Verwenden Sie den großen Link am fixen Ende und schließen Sie die Klemme mit dem großen Link am anderen Ende.

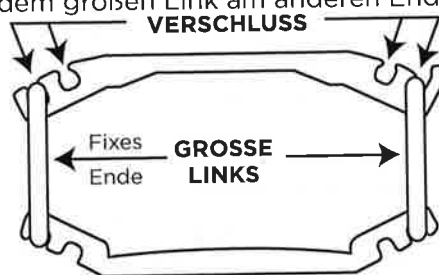

HILFREICHE TIPPS: Oftmals verlieren Betroffene weniger Urin, wenn sie sich in einer horizontalen Position befinden. Bitte prüfen Sie, ob Sie nachts mit einer Einlage zurechtkommen um dem Penis eine Pause von der Klemme zu ermöglichen. Wenn es wichtig für Sie ist die Klemme beim Schlafen zu tragen, dann lockern Sie die Klemme um eine Stufe und tragen Sie die beiden Klemmen abwechselnd, eine während des Tages und eine während der Nacht, um dem Schaumstoff zu ermöglichen, sich nach dem dauerhaften Tragen wieder zu formen.

Wenn die Klemme aus irgendeinem Grund beim Tragen von Boxershorts wegrutschen sollte, dann können Sie Slips tragen, um das zu vermeiden. Die Slips sorgen auch dafür, dass die Einlage nicht wegrutscht.

KONTAKTIEREN SIE UNS: Fragen? Wir haben die Antworten. Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir würden uns freuen Ihnen zu helfen.

ALLGEMEINE SICHERHEITS-/LEISTUNGSANFORDERUNGEN:

Die Dribblestop™ Inkontinenzklemme ist ein Medizinprodukt Klasse 1 und wurde für Männer entwickelt, die an Harninkontinenz leiden. Die Klemme übt an der Penisoberseite und auf die Harnröhre einen leichten Druck aus um den Urinfluss zu stoppen. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn sich nicht an die mitgelieferte Herstelleranleitung gehalten wird.

Sie tragen die Inkontinenzklemme auf eigenes Risiko. Konsultieren vor der Anwendung der Klemme ihren Arzt. Wenn während der Anwendung Probleme wie Schmerzen, Beschwerden oder Hautreizungen auftreten, beenden Sie sofort die Anwendung der Klemme und kontaktieren den Hersteller Rennich Industries Ltd. bzw. ihren Arzt.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Klemme sollte an den Hersteller Rennich Industries Ltd. und die zuständige Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte gemeldet werden.

GARANTIE: Herstellergarantie bei Defekten und Bruchschäden für ein Jahr ab Kaufdatum. Keine Garantie für den Schaumstoff. Der Garantieanspruch muss vorher genehmigt werden. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder eine Bestellung tätigen möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Website unter: **www.dribblestop.com**

Hergestellt/Vertrieben durch:

Rennich Industries Ltd.
#153 - 8737 212 St.
Langley, BC V1M 2C8 Kanada

Email: **dribblestop@shaw.ca**

Dribblestop ist ein eingetragenes und patentiertes Warenzeichen.

Zu 100% in Kanada hergestellt;

Dribblestop™ ist eingetragen bei Health Canada - Kanada

US Food and Drug Administration - USA

EUDAMED - Europe

MHRA - Great Britain: England, Scotland, Wales

  Wellkang Ltd, Enterprise Hub,
NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd,
Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

  Wellkang Ltd (www.UKCA-marking.com)
16 Castle St., Dover, CT16 1PW, England

Kontakt / Vertrieb für Deutschland / Österreich / Schweiz

SIMANKO GmbH

Hinterbuchet 21, 94538 Fürstenstein

Telefon: +49 (0)89/ 28 99 81 38

Email: info@simanko.de

www.männerinkontinenz.de

Juli 2022