

MoliCare® Premium Elastic


Anlegen in nur 4 Schritten

Hier finden Sie unsere Anlegevideos:
www.moli.care/elastic-anlegevideos


Weitere Informationen finden Sie unter www.molicare.de




In stehender Position

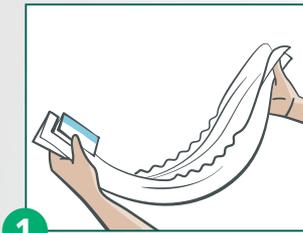

1 Falten Sie das Produkt längs, damit sich eine Mulde bildet und sich die Innenbündchen aufstellen.

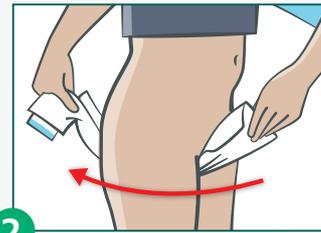


2 Stellen Sie sich neben den Betroffenen. Positionieren Sie das Produkt von vorne nach hinten. Zentrieren Sie es, indem Sie den Nässeindikator an der Wirbelsäule ausrichten.

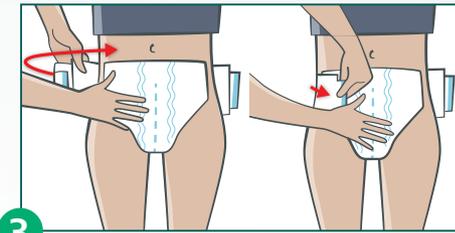

3 Klappen Sie das erste Seitenteil auf und ziehen Sie es um die Hüfte des Betroffenen.

Befestigen Sie den Klebestreifen.

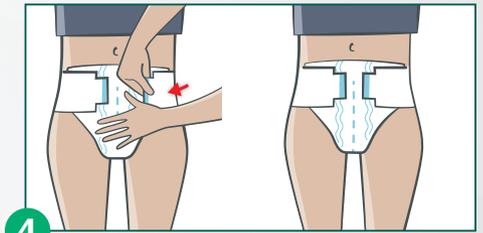


4 Klappen Sie das zweite Seitenteil auf und ziehen Sie es um die Hüfte des Betroffenen.

Befestigen Sie den Klebestreifen.




In liegender Position

Bei Benutzung eines Pflegebettes sollte dieses zur Rückenentlastung so eingestellt werden, dass sich die Matratze auf Hüfthöhe befindet.

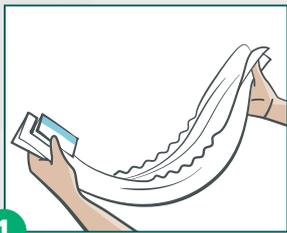


1 Falten Sie das Produkt längs, damit sich eine Mulde bildet und sich die Innenbündchen aufstellen.

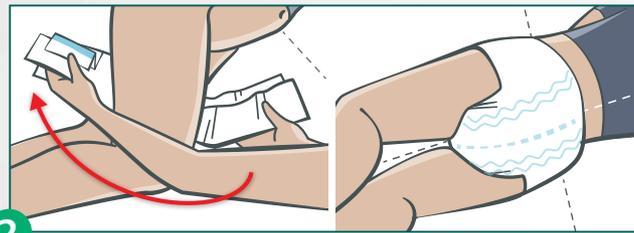


2 Positionieren Sie den Betroffenen in stabiler Seitenlage. Positionieren Sie das Produkt von vorne nach hinten.

Zentrieren Sie das Produkt, indem Sie den Nässeindikator an der Wirbelsäule ausrichten. Drehen Sie den Betroffenen auf den Rücken.

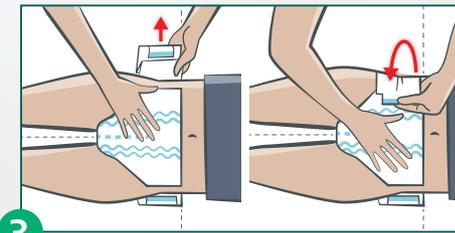

3 Klappen Sie das erste Seitenteil auf und ziehen Sie es über die Hüfte des Betroffenen.

Befestigen Sie den Klebestreifen.

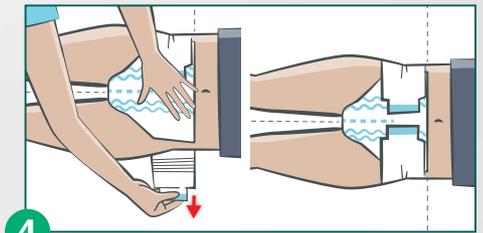

4 Klappen Sie das zweite Seitenteil auf und ziehen Sie es um die Hüfte des Betroffenen.

Befestigen Sie den Klebestreifen.